

RQ9112/c – PROGRAMA DE QUÍMICA CLÍNICA EN SUERO GUÍA DE USO DEL KIT – CICLO 69

El siguiente instructivo está basado en el inserto del kit del programa en mención. Por favor verifique que la caja contiene la totalidad de viales con (5.0 mL) de material liofilizado.

La caja debe almacenarse **en refrigeración (2 - 8 °C)** y los viales que no han sido utilizado siempre dentro de la misma. Por favor trate de mantener la caja lo más alejada posible de la puerta para evitar que se exponga constantemente a choques de temperatura. El manejo de estos viales debe realizarse tomando las medidas de bioseguridad que corresponden, al tratarse de un pool de suero humano.

Recomendaciones de preparación

1. El vial se encuentra sellado; ábralo con cuidado evitando la pérdida de material.
2. Reconstituya utilizando una pipeta volumétrica de vidrio calibrada con **5.0 mL** exactos de agua destilada a 20 - 25 °C. Trate de generar la menor cantidad posible de burbujas.
3. Cierre el vial y deje reconstituir por al menos **60 min** (cada 10 min puede cambiar de posición el vial para asegurar el contacto de todo el material contenido con el diluyente), **dentro del refrigerador con protección de la luz**.
4. Asegúrese que el contenido se ha disuelto completamente mezclando gentilmente en forma de ocho. No agite, ni genere espuma.
5. El liofilizado reconstituido puede procesar hasta **2 días** después de abierto, **como máximo** y las muestras deben **refrigerarse a 2-8 °C** cuando no estén en uso.
6. El ácido acético incluido se utiliza para el procesamiento de analitos Antígeno Prostático y Fosfatasa Ácida; que no aplican para nuestros efectos.
7. A la hora de procesar, asegúrese que el equipo cuenta con una calibración reciente y vigente de las pruebas a analizar.

Calendario

Por favor recuerde que los resultados deben ingresarse antes de las **17:00 h GMT** de la fecha final máxima de reporte permitida (**11:00 am**, hora de Costa Rica).

Muestra	Fecha de análisis recomendada	Fecha máxima de reporte final
1	11 de setiembre de 2023	18 de setiembre de 2023
2	25 de setiembre de 2023	02 de octubre de 2023
3	09 de octubre de 2023	16 de octubre de 2023
4	23 de octubre de 2023	30 de octubre de 2023
5	06 de noviembre de 2023	13 de noviembre de 2023
6	20 de noviembre de 2023	27 de noviembre de 2023
7	04 de diciembre de 2023	11 de diciembre de 2023
8	18 de diciembre de 2023	27 de diciembre de 2023
9	02 de enero de 2024	08 de enero de 2024
10	15 de enero de 2024	22 de enero de 2024
11	29 de enero de 2024	05 de febrero de 2024
12	12 de febrero de 2024	19 de febrero de 2024
13	26 de febrero de 2024	04 de marzo de 2024

