



PREPARACIÓN DE CONTROL DE ELECTROLITOS QE FUJI DRI-CHEM

(506) 2291 3143
info@diagnostika.co.cr
diagnostika.co.cr

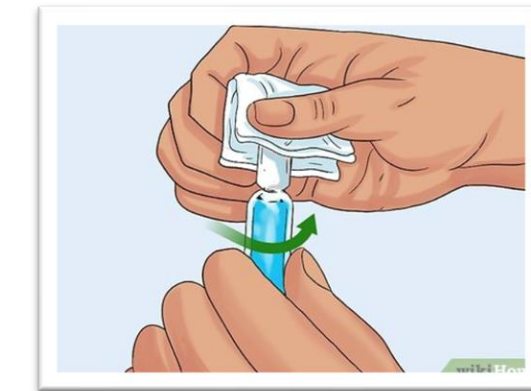

FUJIFILM

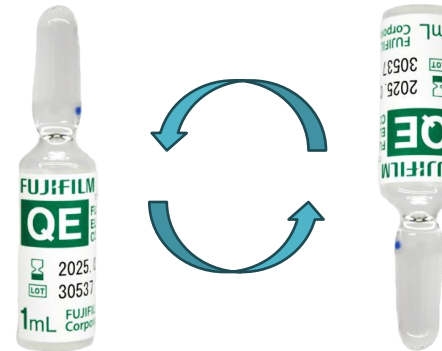

1. Mantenga en refrigeración hasta su uso (2-8°C). Tempere por **30 minutos** antes de usar.

2. Homogenice gentilmente por inversión al menos 20 veces. NO agite. Asegúrese de que no quede líquido en la punta de la ampolla.

3. Quiebre la ampolla en la zona del “cuello” realizando presión en la parte superior de la ampolla. Tenga cuidado de no cortarse.



4. Prepare **3 alícuotas de 330uL** en tubos FUJI de 0.5mL. **Rotule** las mismas con nombre del control, número de lote y fecha de preparación. Almacene en congelación inmediatamente por **hasta 6 semanas**.

5. Procese en el “modo control” una de las alícuotas antes de congelar. Una vez finalizada la prueba, congele inmediatamente esta alícuota.

6. Descongele las alícuotas por 30 minutos antes de su uso y homogenice, sin agitar. Elimine burbujas, si las hay. Deseche la alícuota una vez finalizada la prueba.