

## MANEJO DE DILUENTE DE PCR FUJII DRI-CHEM NX500



(506) 2291 3143

info@diagnostika.co.cr

diagnostika.co.cr



FUJIFILM

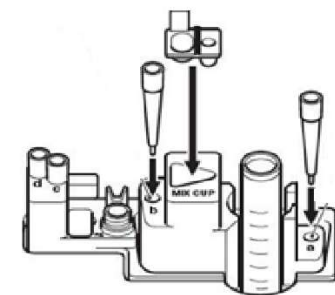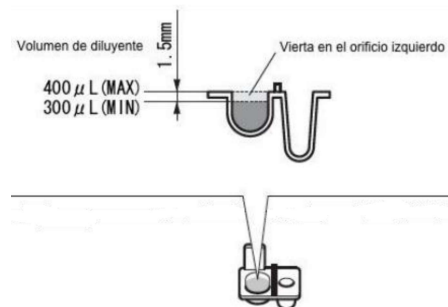

1. Mantenga el frasco en refrigeración hasta su uso (2-8°C). Tempere el diluyente por al menos 15 minutos antes de su uso.

2. Coloque entre 300 y 400uL de diluyente de PCR en una copa de mezcla **nueva**.

3. Regrese el diluyente al refrigerador y cloque la copa de mezcla en la gradilla. Asegúrese que no hayan burbujas antes de procesar. Deseche la copa de mezcla una vez finalizada la prueba. **No reutilice** el diluyente sobrante ni la copa de mezcla.

### Recomendaciones:

- El diluyente de PCR conserva la fecha de caducidad en su etiqueta, aún abierto.
- Mantenga el diluyente de PCR en refrigeración siempre que no se esté utilizando.
- Asegúrese de utilizar copas de mezcla nuevas en cada análisis.