

MANEJO DE DILUENTE DE PCR FUJI DRI-CHEM NX700


(506) 2291 3143

info@diagnostika.co.cr

diagnostika.co.cr



FUJIFILM

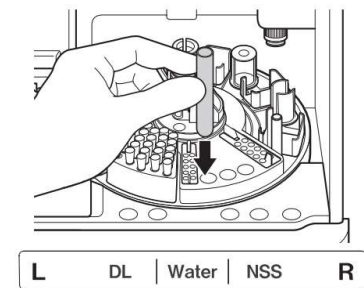

1. Mantenga el frasco en refrigeración hasta su uso (2-8°C).



2. Tome una alícuota de al menos 500uL en un tubo FUJI de 1.5mL. Tempere la alícuota por al menos 15 minutos antes de usar. Regrese el frasco madre al refrigerador.



3. Coloque la alícuota en el soporte de diluyente "DL". Regrese la alícuota al refrigerador una vez finalizada la prueba. Tempere por 15 minutos antes de volver a emplear la alícuota refrigerada.

Recomendaciones:

- El diluyente de PCR conserva la fecha de caducidad en su etiqueta, aún abierto.
- Mantenga el diluyente de PCR en refrigeración siempre que no se esté utilizando.
- Cambie el tubo FUJI de 1.5mL en uso por uno nuevo al menos cada 15 días.
- Asegúrese de contar con pocillos disponibles en las copas de mezcla para realizar la dilución.
- Asegúrese que la alícuota no tenga burbujas antes de procesar.